

Protocole opératoire Procodile®Q

Protocole préconisé pour le **canal palatin** de votre patient virtuel



2,5%

La lime atteint votre longueur de travail estimée.



2,5%

Faites progresser votre lime de 12/100° à votre longueur de travail manuellement. Ensuite descendre progressivement le PathGlider® avec de légers mouvements de picking (va-et-vient) qui le font progresser en direction apical sans pression.



2,5%

Vérifier la perméabilité canalaire. Sélectionner le mode ReFlex Dynamic sur votre EndoPilot®. Après 2 ou 3 mouvements de va-et-vient ou dès qu'une sensation de blocage se fait sentir, retirer, nettoyer, irriguer.



2,5%

Le cycle picking retrait, nettoyage de la lime, irrigation NaOCl 2,5% est répété jusqu'à ce que l'instrument atteigne la longueur explorée.