

Protocole opératoire Procodile®Q

Protocole préconisé pour le **canal vestibulaire** de votre patient virtuel



2,5%

La lime n'atteint pas votre longueur de travail estimée. Utiliser l'opener sur les 3 mm coronaire du canal afin de libérer les contraintes empêchant la progression de la lime.



2,5%

Votre lime atteint votre longueur de travail. Descendre progressivement le PathGlider® avec de légers mouvements de picking (va-et-vient) qui le font progresser en direction apical sans pression.



2,5%

Vérifier la perméabilité canalaire. Sélectionner le mode ReFlex Smart sur votre EndoPilot®. Après 2 ou 3 mouvements de va-et-vient ou dès qu'une sensation de blocage se fait sentir, retirer, nettoyer, irriguer.



2,5%

Le cycle picking retrait, nettoyage de la lime, irrigation NaOCl 2,5% est répété jusqu'à ce que l'instrument atteigne la longueur explorée.